

30 ANNI

Me.Ber. S.r.l.

Via Langhirano, 270 - 43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 - Fax +39 0521 648780
e-mail: contact@meber.it - www.meber.it

MARZO 2018

Numero **44**

MEBER+

IN CASE OF EMERGENCY

www.meber.it

Medical Journal

Organo di informazione aziendale realizzato da Me.Ber. srl. Per informazioni contattare contact@meber.it o accedere al sito www.meber.it

PAG. 2
EXTRA ERGOLIFT
Presentazione

PAG. 4
EXTRA ERGOLIFT
Istruzioni per l'uso

PAG. 6
INSTALLAZIONE IN SEDE

PAG. 7
Sistema di fissaggio per
Extra Ergolift

MEBER+
IN CASE OF EMERGENCY

Per informazioni sui prodotti Me.Ber. contattateci subito al numero

+39 0521.648770

oppure visitate il nostro sito web

www.meber.it

FOCUS ON

Extra Ergolift

Sedia sali/scendiscale motorizzata



Extra Ergolift è la versione motorizzata della sedia cingolata scendiscale **Extra** di cui mantiene le caratteristiche strutturali che l'hanno contraddistinta: telaio leggero in lega di alluminio, leve anteriori e maniglione di presa posteriore telescopici, pratici braccioli rivestiti, pedana poggipiedi anteriore, cingoli lunghi e ad alta aderenza che consentono l'appoggio su tre gradini e quattro ruote, due posteriori Ø 200 mm e due anteriori girevoli Ø 125 mm, per il trasporto in piano.

L'innovazione introdotta dal modello Extra Ergolift è data dalla presenza di un motore elettrico che aziona i cingoli, consentendo la salita e la discesa dalle scale senza alcuno sforzo per l'operatore. Il motore si aziona mediante una console di comando wireless. La batteria garantisce un'elevata autonomia e, in caso di scaricamento durante il servizio, è ugualmente possibile terminare la discesa in totale sicurezza. Extra Ergolift garantisce una portata di 200 kg nella configurazione di trasporto motorizzata e 230 kg in quella manuale e può essere usata anche in caso di pioggia e condizioni climatiche avverse.



CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE: Leghe di alluminio

LUNGHEZZA: 84-150 cm

LARGHEZZA: 55 cm

ALTEZZA: 104 cm

ALTEZZA SEDUTA: 50 cm

PESO: 29 kg

PORTATA: 200 kg (trasporto motorizzato) 230 kg (trasporto manuale)

BATTERIA: 28 V

SPESSORE CHIUSA: 29 cm

AUTONOMIA: 18 rampe da 20 scalini con un carico di 130 kg

TEMPO DI RICARICA: max 1 ora

Per informazioni sui prodotti Me.Ber. contattateci al numero:

+39 0521 648770

oppure visitate il nostro sito web

www.meber.it



ORDINARIA. STRAORDINARIA.



Extra Ergolift è il dispositivo ideale sia per l'evacuazione del paziente in caso di emergenza che per le attività ordinarie.

I principali campi di utilizzo di una sedia motorizzata sono infatti servizi di trasporto in cui il paziente viene prelevato o riaccompagnato a casa o presso una struttura di degenza, in cui potrebbe non essere presente l'ascensore. Equipaggi composti da sole donne o da personale che normalmente richiede aiuto fisico, possono movimentare senza alcuno sforzo anche pazienti molto pesanti. Bastano due persone.

Per informazioni sui prodotti
Me.Ber. contattateci al numero:

+39 0521 648770 oppure visitate
il nostro sito web

www.meber.it

Extra Ergolift: ISTRUZIONI PER L'USO



1



Abbassare la pedana poggia piedi e aprire la sedia premendo le levette di sblocco poste al di sotto della seduta. Abbassare anche i braccioli poggia-braccio.

2



Apertura dei cingoli: sbloccare il carrello cingolato agendo sulla leva posta in prossimità del pistoncino meccanico posteriore e abbassarlo fino a completa apertura.

3



Aprire il maniglione premendo verso il basso la leva posizionata sotto la console.

4



Applicare la batteria precedentemente ricaricata, sulle apposite guide e accendere la centralina premendo l'interruttore di accensione posto sul carter del motore.

5




Accendere la console premendo un qualsiasi tasto della maschera di interfaccia. Premere le leve a farfalla verso il basso o verso l'alto per movimentare i cingoli.

6



Trasporto del paziente sulle scale: sollevare le leve anteriori e premere il maniglione verso il basso. Ricordarsi sempre di assicurare il paziente con le cinghie.

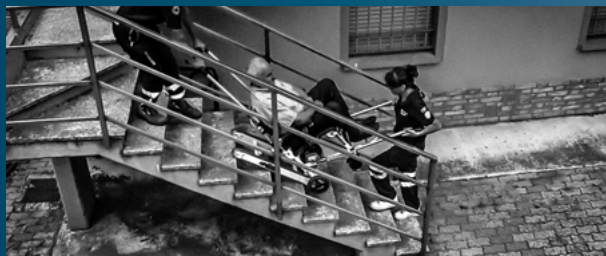

SUGGERIMENTI

1- Ricarica della batteria: collegare la batteria al caricatore seguendo il verso delle frecce indicate in figura 1. Al termine di ogni utilizzo controllare sempre sullo schermo della console il livello di carica della batteria.

2- Ricordarsi sempre di bloccare e/o sbloccare il freno delle ruote anteriori, come in fig. 2.

3- La velocità di salita e discesa può essere modificata in base alle esigenze, tramite i comandi della console (Fig. 3).

4- Chiusura e fissaggio: Premere le levette di sblocco poste al di sotto della seduta e chiudere la sedia su se stessa. Sollevare il gancio tirando la maniglia verso l'alto; posizionare la sedia nell'area sottostante, riabbassare il gancio fissandolo sul maniglione posteriore (Fig.4)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

VISITA LA SEZIONE VIDEO SUL SITO WWW.MEBER.IT OPPURE VAI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE PER QUESTO E MOLTI ALTRI VIDEO.



Cerca



Video istruzioni Extra Ergolift Montaggio e Utilizzo

1.945 visualizzazioni

2 0 CONDIVIDI



Meber

Pubblicato il 22 set 2015

MODIFICA VIDEO

Un video dettagliato per guidare gli Operatori del Soccorso nell'utilizzo della nuova sedia sali/scendiscscale motorizzata Extra Ergolift

MOSTRA ALTRO

INSTALLAZIONE IN SEDE

Come viene gestita la sedia motorizzata?

Come già accennato in precedenza, la sedia motorizzata Ergolift è impiegata in molti servizi ordinari o secondari, come il trasporto di pazienti disabili.

Le associazioni possono così decidere di lasciare il dispositivo in sede, per utilizzarlo solo in casi di servizi particolarmente faticosi.

È il caso dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, che hanno ideato



Fig. 2



Fig. 1

un sistema di fissaggio in sede, sfruttando al meglio gli spazi disponibili. (Vedi fig. 1). Il sistema prevede una cinghia ancorata al muro e una barra fissata al pavimento. (Vedi fig.2)

L'idea ci è sembrata molto funzionale e abbiamo deciso di condividerla per coloro che hanno problemi di spazio nelle proprie sedi.



...in dotazione 3 cinture a 2 pz. con fondo nero e logo MeBer arancio



ERGOLIFT fixing system

Sistema di fissaggio per sedia Extra Ergolift



Dispositivo progettato per assicurare il fissaggio in ambulanza della sedia Extra Ergolift. Realizzato in acciaio inox, è resistente alla corrosione e facilmente sanificabile. L'innovativa configurazione monoblocco consente all'operatore di movimentare la sedia nelle fasi di bloccaggio e sbloccaggio in modo rapido e semplice. Il sistema di bloccaggio per la sedia Extra Ergolift è compatibile anche con la versione Extra tradizionale.

Dimensioni: 58x112x23 cm (LxAxP)



PORTATA MAGGIORATA



La portata di 200 kg nel trasporto motorizzato e di 230 kg in configurazione manuale consente il trasporto rapido e semplice anche di pazienti con peso elevato.

MEBER+

IN CASE OF EMERGENCY

GAMMA EXTRA



ART. 670/BR



ART. 678



ART. 676

Qualità dei materiali e precisione dei movimenti

...e non solo Extra

QUICK sedie portantine
pieghevoli

659/B - 659/Y
658/B - 658/Y
654/B - 654/Y



MAYA sedie portantine
pieghevoli

653
655
650



PROXIMA sedie portan-
tine imbottite

682
683



Per informazioni contattare:

+39 0521.648770



www.meber.it