

# MEBERTH®

## M E D I C A L J O U R N A L

### MEDICAL JOURNAL

Speciale recupero in  
zone impervie: quando  
i dispositivi devono  
dare il massimo

I migliori prodotti e le corrette tecniche  
di utilizzo fanno la differenza quando  
l'ambiente è ostile.

All'interno



**Ergon - Barella a  
geometria variabile**

Quando la scelta del  
dispositivo è vitale.



**Spider - Sistema di  
trattenuta**

Sicuro, pratico e rapido.



**Galaxy - Tavola spinale**

Il dispositivo più utilizzato  
dagli operatori.



**Snake Plus - Materasso  
a depressione**

Per immobilizzare anche in  
condizioni estreme.



# Emergenza in ambienti impervi



## Sfidare i limiti

Il soccorso in ambienti naturali ha sempre rappresentato problematiche operative per gli operatori e ha sempre messo a dura prova i dispositivi utilizzati. I contesti di questo tipo sono il teatro di emergenze di varie tipologie che possono includere situazioni legate a sport e tempo libero, a incidenti sul lavoro a persone che operano in queste zone. Ogni ambiente esterno però può diventare impervio in conseguenza di eventi climatici, sismici o di altra natura. Tutte queste situazioni hanno una costante: l'imprevedibilità. A questo un buon soccorritore sopperisce con la formazione, l'addestramento, l'esperienza e infine con la dotazione di dispositivi altamente affidabili.

### Guarda il video!!!

SOCCORSO A PAZIENTE  
TRAUMATICO SU  
TERRENO ACCIDENTATO



## La risposta di Me.Ber.

La scelta di Me.Ber. è da sempre quella di fornire un ampio ventaglio di soluzioni, prodotti e tecnologie che possano soddisfare le esigenze di diversi tipi di soccorso. Non solo barelle e sistemi di immobilizzazione, ma anche zaini e ausili completano il ricco catalogo di opzioni per i soccorritori delle aree più remote e impervie.

Se questa è sempre stata la logica principale è da diversi anni che con il progetto della barella ad alta tecnologia *Ergon* si va verso una soluzione unica, universale, che possa da sola fronteggiare la maggior quantità possibile di situazioni.

In ambienti scomodi e ostili la patologia traumatica rappresenta l'incidenza più rilevante e che richiede un trattamento specifico. Il paziente eventualmente politraumatizzato richiede la massima precauzione nelle fasi di recupero e di trasporto, ma al tempo stesso i soccorritori sono chiamati ad operare con difficoltà e talvolta distanti dal veicolo di trasporto.

La combinazione di *Ergon* e i suoi accessori principali (fermacapo e sistema di cinture ragno) con il materasso a depressione *Snake* garantiscono un ottimo livello di sicurezza e permettono anche ad un equipaggio di numero contenuto di disporre dei migliori dispositivi sul luogo dell'evento. Naturalmente *Ergon* non esclude la validità delle tavole spinali *Galaxy*, che continuano ad essere il dispositivo di elezione per il trattamento del sospetto trauma spinale, ma permette di avere un'alternativa che sotto molti punti di vista è migliorativa: maggior comfort per il paziente, migliore isolamento termico, riduzione dei movimenti da log-roll, miglior presa.






# L'importanza di fare la scelta migliore

## Un'innovazione chiamata Ergon

*Ergon* è la prima barella studiata per semplificare il lavoro dei soccorritori e garantire il comfort e la sicurezza del paziente; grazie alla nuova tecnologia dotata del sistema di chiusura snodato *Flexilock*, è possibile separare la barella in due metà, questo garantisce una comodità durante il trasporto pre-intervento e permette inoltre di distribuire il peso e di effettuare recuperi con facilità, anche in ambienti difficili, inserendosi tra il suolo e il paziente. Recupero che è reso ancora più rapido e facile grazie al sistema di trattenuta *X-Fix*. *Ergon* mantiene così la flessibilità delle barelle a cucchiaino ma al tempo stesso ha tutti i benefici delle tavole spinali, garantendo stabilità e supporto.

## Il recupero con tavola spinale

La tavola spinale per adulti *Galaxy* è progettata per uno scopo preciso: fornire il miglior supporto a pazienti traumatici. Altamente resistente, *Galaxy* è dotata di diverse maniglie per il trasporto e di completo equipaggiamento di cinture di immobilizzazione spinale *Spider* e di ferma-capo per tavola spinale *Jelly*. In questo modo la tavola può essere componibile e rappresenta la migliore opzione per il supporto spinale oltre che una tra le migliori soluzioni durante la fase di immobilizzazione.

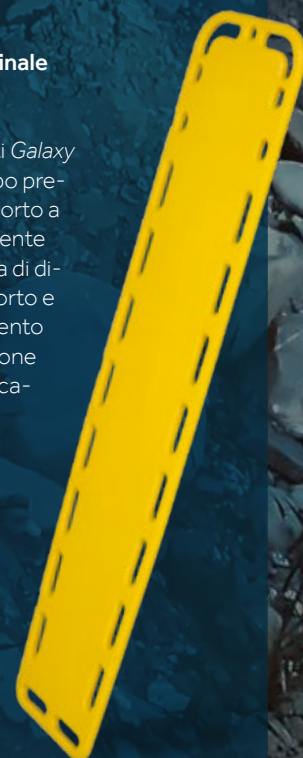



**Focus on** Come scegliere il dispositivo ideale?

# Recupero. Bene poter scegliere, meglio scegliere bene!

Versatilità

Sicurezza per pazienti e operatori

Idoneità al trattamento del trauma



## Superare i limiti con Ergon

In contesti di soccorso ed emergenza scegliere il meglio è un dovere. La scelta ricade dunque sul più innovativo dispositivo per il recupero e il trasferimento del paziente: Ergon; uno strumento flessibile e completo che rende la fase di soccorso più semplice e garantisce all'assistito la massima comodità e sicurezza. Ergon permette di effettuare recuperi anche in ambienti difficili e di scarsa accessibilità grazie a una struttura compatta, alla nuova tecnologia di chiusura flexilock. La colorazione ad alto contrasto inoltre è pensata per renderla visibile in ogni contesto, sia di giorno che di notte. Pensata per permettere un elevato contenimento laterale grazie al suo design e alla sua combinazione con la gamma di materassi a depressione. Ergon è completa, sicura e adatta a tutti: il materiale garantisce il massimo comfort all'as-

sistito e permette un elevato isolamento termico, anche in casi di prolungata permanenza del paziente sul dispositivo in climi freddi. Inoltre è studiata per ridurre al massimo il rischio e i tempi di soccorso eliminando la manovra log-roll e garantendo un pratico supporto al rachide cervicale grazie anche a gli appositi accessori. Ergon è un dispositivo rivoluzionario che racchiude i pregi delle tavole spinali, come la resistenza e l'alta robustezza, e le caratteristiche che contraddistinguono le barelle a cucchiaino. Uno strumento flessibile che offre agli operatori la massima facilità e praticità di utilizzo e sostegno grazie a un elevato grip dei punti di presa, anche in condizioni meteo sfavorevoli. Ergon è un dispositivo completo e rappresenta il connubio perfetto tra comfort e perfezione strutturale.



## Dispositivi Me.Ber.



Ergon

Maxima

Galaxy

Barella

Toboga

Supporto spinale



Flessibilità di impiego



Punti di presa



Idoneità contesti impervi



Idoneità climi freddi



Portabilità



Contenimento laterale



## Scopri come usare Ergon al meglio



Per rendere il lavoro più agevole per l'operatore e più sicuro per il paziente, Me.Ber. ha prodotto una serie di video girati con formatori professionisti in varie condizioni operative.





Promo

**SCEGLI  
GIULIETTA O  
ROMEO E AVRAI....**



**GRATIS  
PER TE!**

**INFRARED**  
Termometro a infrarossi  
ART. 8377




**GIULIETTA**  
Borsa per emergenza  
ART. 1319

**ROMEO**  
Zaino di soccorso  
ART. 1318

**IN REGALO** un termometro a infrarossi Infrared con ogni zaino Romeo o borsa emergenza Giulietta

**Restate sempre  
aggiornati!**

Scopri tutte le  
promozioni sul sito  
[www.meber.it](http://www.meber.it)

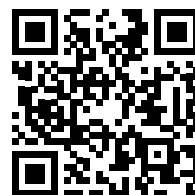

Promo

# CON IL KIT COMPLETO GALAXY TAVOLA SPINALE...



## CON UNA TAVOLA SPINALE

### GALAXY

Tavola spinale  
ARTT. 9010, 9012 o 9016

Colore della  
tavola a scelta

+

## CINTURE RAGNO

### SPIDER

Cinture ragno  
ART. 690

+

## GRATIS PER TE!

### INFRARED

Termometro a infrarossi  
ART. 8377



+

## FERMACAPO

### JELLY

Fermacapo imbottito  
ART. 629



**IN REGALO** un termometro  
a infrarossi Infrared con ogni  
tavola spinale completa di  
cinture ragno e fermacapo





# Grande successo di Me.Ber. al REAS 2023

**Tanti nuovi prodotti e tanti progetti per il futuro.**



Con i suoi 29.000 visitatori REAS, Salone Internazionale dell'Emergenza, si è dimostrata ancora una volta un punto di riferimento per il settore del soccorso e dell'emergenza. Nata nel 2000 con un numero esiguo di espositori, è cresciuta in modo esponenziale di anno in anno fino alla partnership nel 2013 con Hannover Fairs International GmbH e con Interschutz in cui ha acquisito la qualifica di fiera internazionale. Obiettivi primari del REAS sono l'innovazione e l'accrescimento del bagaglio tecnico di operatori e volontari. Nei tre giorni di fiera, infatti, viene fornito ogni tipo di

strumento o mezzo per chiunque abbia voglia di farsi coinvolgere: corsi, tutorial, gare, tornei, workshop, convegni, eventi formativi e tanto altro. Tre sono le parole d'ordine: INNOVAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. Me.Ber. vanta un ruolo in prima linea come espositore ventennale. Nei suoi 169 m<sup>2</sup> di stand l'azienda ha sempre esposto gli articoli di punta oltre alla presentazione delle ultime novità. L'edizione 2023 ha riconfermato il grande successo della Mercury Cinque Lite e della sedia motorizzata Kuma, e non solo. Grande interesse per il sistema di caricamento e

scaricamento assistito Hercules che agevola i soccorritori nelle operazioni di routine, supporto già consolidato nel corso di due anni di sperimentazioni. Una menzione va anche al gradino laterale automatico per mezzi di soccorso ad azionamento meccanico, ultimo progetto in casa Me.Ber. Tante novità già in serbo per l'edizione 2024 di REAS che si svolgerà dal 4 al 6 ottobre e molte altre fiere internazionali in previsione dei prossimi mesi. Informazioni sempre aggiornate sulle pagine social e sul sito di Me.Ber. [www.meber.it](http://www.meber.it).

